

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
System Code No	Component Parts	Description	Material Composition	Maximum Temperature	Steam Sterilization Compatibility	Ethylene Oxide Compatibility	Hydrogen Peroxide Compatibility	Enzymatic Detergents	Neutral pH Detergents	Alkaline Detergents	Neutralizing (acidic) Detergents	Water-based Lubricants	Isopropyl Alcohol	Glutaraldehyde	Ortho-phthalaldehyde	Sodium Hypochlorite	Quaternary Ammonia	High Level Disinfection
1	SST-2136																	
2		113-2136-T	Base	PPS	285°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
3		DT-2136	Basket	Polypropylene	275°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
4		113-213C	Cover	PESU	288°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
5		2136 GKT	Clear w/Gasket Cover	Polycarbonate	210°F	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y			
6																		
7	SST-2136 RD																	
8		2136 RD	Base	Polypropylene	250°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
9		DT-2136	Basket	Polypropylene	275°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
10		2136C	Cover	Polypropylene	250°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
11																		
12																		
13	SST-2136 GKT																	
14		113-2136-T	Base	PPS	285°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
15		DT-2136	Basket	Polypropylene	275°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
16																		
17		213C-GSK	Cover	Nekron 2856 Polycarbonate (thermoplastic polymer) (Lid) Polyurethane (Gasket)	250°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
18		SST-2136 GKT LTCH	Latch	Polypropylene	275°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
19																		
20	SST-283 RD																	
21		1218B	Base	Polypropylene	275°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
22		DT-2128	Basket	Polypropylene	285°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
23		1218	Cover	Polypropylene	275°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
24																		
25	SST-105 BL																	
26		105B BL	Base	Polypropylene	275°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
27		DT 105	Basket	Polypropylene	275°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
28		105C BL	Cover	Polypropylene	275°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
29																		
30	SST-105S																	
31		105B	Base	Polypropylene	275°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
32		DT 105	Basket	Polypropylene	275°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
33		105C-S	Cover	Polypropylene	275°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
34																		
35	SST-105 RL																	
36		105B RL	Base	Polypropylene	275°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
37		DT 105	Basket	Polypropylene	275°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
38		105C RL	Cover	Polypropylene	275°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
39																		
40	SST-105-S RD																	
41		105B	Base	Polypropylene	275°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
42		DT 105	Basket	Polypropylene	275°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
43		105-C-S RD	Cover	Polypropylene	275°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
44																		
45	SST-2006-TC																	
46		2006-4-T	Base	PPS	285°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
47		DT-2006-4-T	Basket	PPS	285°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
48		2006-C Cover	Cover	PESU	288°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y

