



healthmark  
INDUSTRIES CO

health care products

33671 Doreka Drive  
Fraser, Michigan 48026  
Telephone (586) 491-2002  
Fax: (586) 491-2113  
www.HMARK.COM


## PULL-TITE SEAL

### Application Instructions

### Instrucciones para la aplicación de los sellos PULL-TITE


1. Pull-Tite II® Seals are provided in 10-mat form. To separate seals, hold tab between thumb and forefinger and pull down.

*Los sellos Pull-Tite ® se suministran en tiras de 10 unidades. Para separar los sellos, sujetar la etiqueta con los dedos pulgar e índice y tirar de ella hacia abajo.*

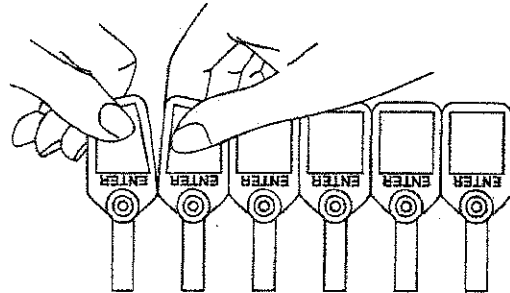


2. Insert the tail of the Pull-Tite Seal through the locking dome on the side marked "Enter".

*Introducir la cola del sello Pull-Tite II a través de la copa de sujeción desde el lado con la palabra "Enter".*

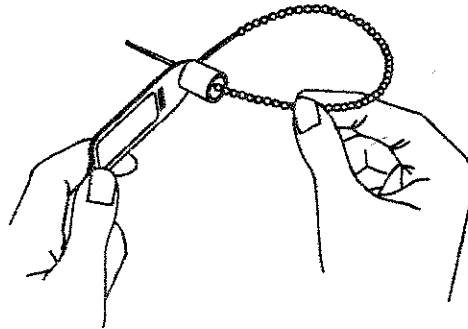

3. Next pull the tail as tight as possible around the item being sealed. Then gently tug on the looped portion of the tail away from the locking dome to insure that the locking barb is properly set into position.

*Después, tirar de la cola tan fuertemente como sea posible alrededor del objeto que se desea sellar. Posteriormente, dar un tirón leve a la porción enlazada de la cola hacia afuera de la copa de sujeción para asegurarse de que las lengüetas de sujeción estén enganchadas en posición.*

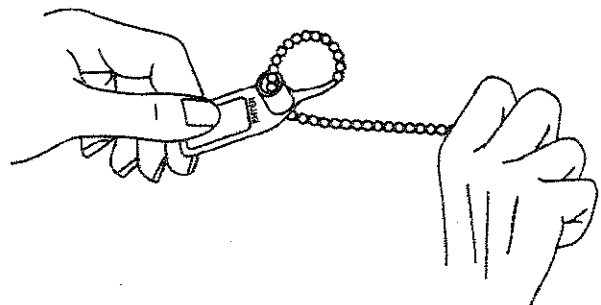

**CAUTION:** Failure to follow these instructions may result in the tail pulling out.

**PRECAUCIÓN:** El incumplimiento de estas instrucciones puede resultar en que la cola se salda de la copa de sujeción.